



Enhance®
Finishing System

Coarse when you need it,
fine when you want it.

سیستم فینیشر Enhance این توانایی را دارد که کل پروسه برداشت اضافات کامپوزیت ، کانتورینگ و همچنین فینیشینگ را تنها با تغییر میزان فشار وارده به مولتی منحصربفرد به انجام برساند . فشار بیشتر به مولت برای برداشت اضافات کامپوزیت، کاهش فشار وارده به مولت برای کانتورینگ و نهایتاً فینیشینگ نهایی با کمترین میزان فشار به مولت فینیشر Enhance انجام میشود . تنها در یک مرحله و با یک مولت فینیشر Enhance میتوانید سطحی صاف ، کانتور شده و با نمایی طبیعی داشته باشید . تنها نکته استفاده از این مولت ، میزان فشاری است که به آن وارد میکنید . در یک مرحله درمان خود را تمام کنید .

مراحل کار کمتر، زمان کار کمتر، نتایج چشم نواز

برای برداشت اضافات ترمیم و کانتورینگ اولیه، فشار بیشتری را به مولت اعمال کنید؛ با کمتر کردن فشار وارده به مولت، عملکرد آن تغییر یافته و جهت ایجاد سطحی صاف به کار میرود. تمامی این مراحل بدون نیاز به تعویض و یا تغییر مولت انجام میپذیرد و تنها عاملی که تغییر میکند، میزان فشاری است که شما به مولت اعمال خواهید کرد! بر روی فینیشینگ سریعتر و بهتر تمرکز کنید.

بیش از ۷۰٪ دندانپزشکان اعلام داشته اند که سادگی و راحتی، یکی از مهمترین دلایل برای انتخاب یک سیستم فینیشینگ و پالیشینگ مناسب است. به همین دلیل است که ما سیستم فینیشینگ منحصر بفرد Enhance را طراحی و تولید نمودیم. سیستمی که با آن کل مراحل فینیشینگ شما به یک مرحله ساده مبدل میگردد. از این ساده تر بسیار بعید است!



برداشت اضافات ترمیم و کانتورینگ



فینیشینگ




ترمیم کلاس II با کامپوزیت ceram.x
بعد از مرحله فینیشینگ به کمک Enhance

نهایت درخشندگی!

بعد از دستیابی به نتیجه زیبا و طبیعی با استفاده از مولت های فینیش Enhance®، جهت رسیدن به درخشندگی چشم نواز نهایی، از پالیشهای الماسه Enhance® PoGo® استفاده نمایید.

Maximum gloss per system²

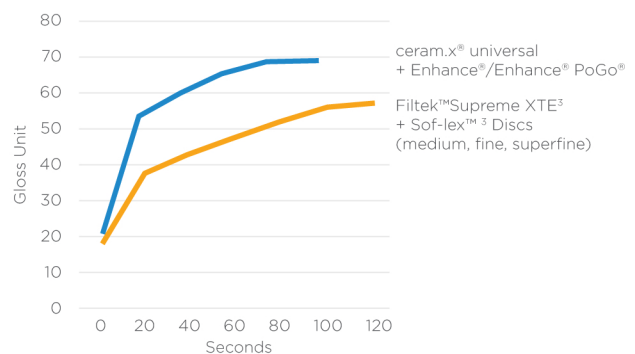

اطلاعات سفارش محصول :

مولت های سیستم فینیشینگ Enhance®

Finishing Discs عدد ۴۰

Finishing Cups عدد ۴۰

Finishing Points عدد ۴۰

کیت کامل سیستم Enhance®/Enhance® PoGo®

مولت های فینیشینگ Enhance® ۱۰ عدد از هر مدل

مولت های پالیشینگ Enhance® PoGo® ۱۰ عدد از هر مدل



شرکت پارسه اتکال

نماینده انحصاری در ایران

۰۲۱-۲۲۳۹۶۵۰۰

پخش توسط شرکت پارسه تریتا آریانا (DDS Kala)

www.ddskala.ir

1. Exevia: Dental Shuttle Q4, 2016, Germany
2. da Costa J, Ferracane JL (OHSU, Portland, OR)
3. Not a registered trademark of Dentsply Sirona, Inc.