

دیار شفاف داشته باشید



EXACLEAR GC

ماده وینیل پلی سایکلوسان شفاف

اگر تصمیم داشتید با شفافیت کار کنید ،

ما در کنارتان خواهیم بود !

، 'GC'، '

EXACLEAR GC

شفافیت در درمان بیماران شما

یک محصول نوآورانه است ، سیلیکونی کاملاً شفاف که بیازهای شما را در کیس های درمانی زیبایی برآورده نموده و راه شما را برای دستیابی به نتایج درخشنان تسهیل مینماید . این شفافیت های پیچیده کلینیکی به صورت بسیار موثری به کمک خواهد آمد .



میزان کنترل چشمی در زمان تزریق کامپوزیت

نمای کاملاً شفاف کریستالی

شفافیت بالای کریستالی این ماده ، کنترل چشمی بسیار مناسبی را برای شما فراهم میکند و همچنین امکان عبور نور لایت کیور را از ورای سیلیکون فراهم مینماید که این مورد به افزایش تاثیرگذار میزان conversion rate انجامیده و از تشکیل لایه اکسیژن مهار نشده به طور موثری جلوگیری نموده تا در نهایت مرحله پالیشینگ نهایی بسیار آسان تری را در پیش داشته باشد .



میزان شفافیت EXACLEAR (اولین نمونه از سمت راست) در برابر سایر رقبا

قوام ایده آل برای یک درمان موفق



قوام ایده آل جهت
قرارگیری راحت مواد
در داخل تری



سیالیت مناسب در زمان
تزریق جهت تطابق عالی و کامل
برای بازآفرینی دقیق تمامی
جزیبات



سخت و محکم بعد از
زمان ستینگ و در عین حال
امکان برش و ایجاد حفره تزریق
کامپوزیت بسیار ساده



انعطاف پذیری کافی
برای برداشت راحت و
بدون اختلال شکستگی
و تغییر شکل قالب

زمان هم پارامتر بسیار مهمی است

پس از تنها ۲ دقیقه در داخل محیط دهان ، ماده قالبگیری شما سنت شده و
میتوانید تری را خارج کنید .

وقتی بر روی مدل و خارج از محیط دهان کار میکنید ، ماده قالبگیری شما
در حدود ۷ دقیقه سنت میگردد .



ستینگ تایم ۲ دقیقه داخل دهان



ستینگ تایم ۷ دقیقه خارج دهان

در مورد تکنیک injection moulding چه میدانید؟

زیباترین و نیرهای مستقیم را در داخل مطب خلق کنید!

EXACLEAR به همراه کامپوزیت های اینجکتبول همچون G-aenial Universal Injectable این امکان را در اختیار درمانگر قرار میدهد که ترمیم هایی با زیبایی ترمیم های غیرمستقیم ولی سریعتر، مقرون به صرفه تر و البته با تراش های محافظه کارانه تر خلق نماید.

شفافیت کریستالی EXACLEAR به شما امکان بررسی ریزترین و دقیق ترین جزئیات را داده و همچنین از تشکیل لایه اکسیژن مهار نشده جلوگیری نموده تا درنهایت پالیشینگ نهایی راحت تری را تجربه نمایید. G-aenial Universal Injectable به دلیل خواص تیکسوتروپیک، استحکام و درعین حال درخشندگی نهایی بینظیر، کاملاً برای استفاده در این تکنیک یک انتخاب هوشمندانه و عالی است.



۱. وضعیت اولیه



۲. تری قالبگیری را با EXACLEAR پر کنید و پس از WAX-UP از مدل قالبگیری نمایید.



۳. بعد از ستینگ، سیلیکون شفاف را از تری خارج نمایید.



۴. در داخل سیلیکون، حفره ای را جهت ایجاد فضای برای ورود تیپ کامپوزیت ایجاد کنید.



۵. پس از ایزووله نمودن دندانهای مجاور، مینا را اچ نموده و باندینگ را اپلای کنید.



۶. قالب سیلیکونی شفاف را داخل دهان بیمار قرار داده و G-aenial Universal Injectable را از داخل حفره ایجاد شده، تزریق کنید.



۷. از روی سیلیکون کی، کامپوزیت را کیور کنید.
و پس از کیور، قالب سیلیکونی را بردارید.



۸. اضافات کامپوزیت را به کمک تیغ بیستوری بردارید.



۹. نتیجه نهایی پس از طی مرحله پالیشینگ.

درمان سایش های جنرالیزه شده به کمک ترمیم کامپوزیتی مستقیم در مطب

تکنیک injection moulding برای درمان بیماران دچار سایش دندانی و همچنین کیس هایی با مورفولوژی پیچیده یک انتخاب ایده آن است. EXACLEAR کمک میکند تا با دید مناسب، حجم تزریق را کنترل کنید و در عین حال بتوانید چندین دندان را به طور همزمان درمان کنید. استحکام خمی و همچنین مقاومت در برابر سایش بالا، G-aenial Universal Injectable را به یک انتخاب عالی در چنین کیس هایی مبدل میکند.



۱. وضعیت اولیه



۲. تری قالبگیری را با EXACLEAR پر کنید و از مدل خود، قالبگیری کنید.



۳. وضعیت نهایی پس از درمان با استفاده از تکنیک injection moulding.

با EXACLEAR

شفاف بیینید!



EXACLEAR	
۰۱۲۷۹۲	عدد کارتیج ۵ گرمی ۱
۹۰۰۱۱۴	میکسینگ تیپ تایپ II L

همراهان قدرتمند شما در کیس های کلینیکی پیچیده

تکنیک

Injection moulding

کنترل آسان میزان تزریق از ورای
EXACLEAR



G-aenial Universal با
Injectable

کامپوزیت اینجکتبول
با استحکام بسیار بالا و
خواص تیکسوتروپیک عالی

ساخت کراون و بریج

موقعت

پلیمریزاسیون نوری کامل
مواد ساخت کراون و بریج موقعت از ورای
EXACLEAR



TEMPSMART DC با

ماده دوال کیور
ساخت کراون و بریج
موقعت

شرکت دبیا طب پارس
نمایندگی انحصاری در ایران

۰۲۱ ۲۲۳۹۶۵۰۰

توزیع سراسری از طریق
www.dds-kala.com



DDS KALA

Online Shopping

'GC'